


KEMISKE INDIKATORER

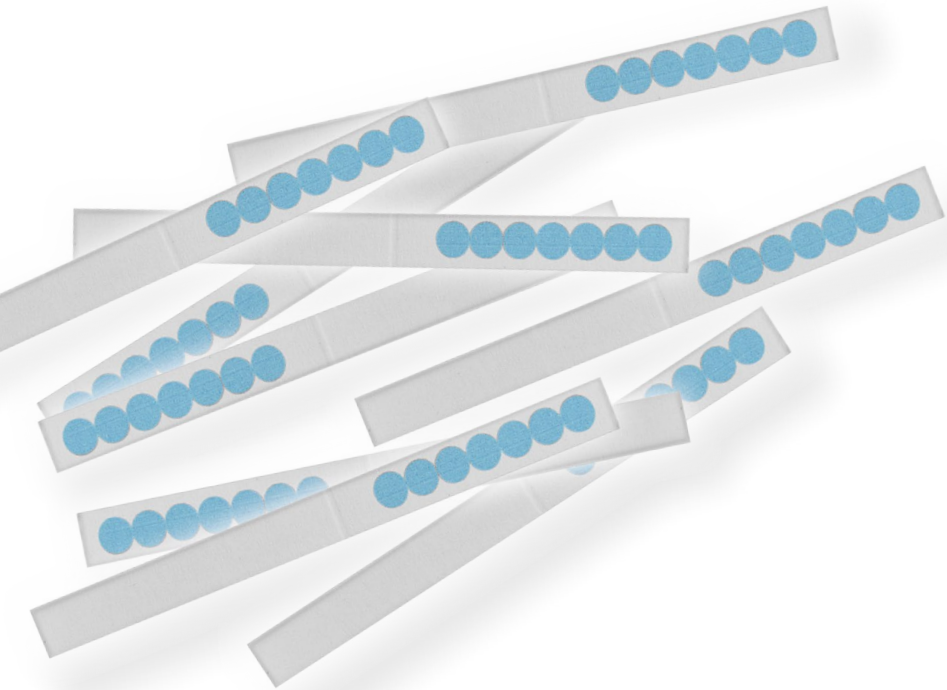

KEMISKE INDIKATORER (KI)

Anvendelsesområde

SIMICON's kemiske indikatorer anvendes til validering og rutinekontrol af sterilisationsprocessen i autoklaver. Kemiske indikatorer er et godt supplement til de biologiske indikatorer og skal anvendes ved hver sterilisationsproces.

Egenskaber

SIMICON KI er en multivariabel kemisk indikator, der består af en farvet kemisk forbindelse, som er afsat som pletter på en papirstrip. Pletterne skifter farve fra lyseblå til sort, når de kritiske parametre, såsom luftuddrivnings- og damppenetrationsevne, temperatur, tryk og tid, er opnået. De kemiske indikatorer kan anvendes med eller uden en Proces Challenge Device (PCD).

Testrapport

Klinikum München GmbH, Hygiejne - Dr. Schwarzkopf.
Institut für angewandte Hygiejne, Graz - Dr. Miorino.

Specifikationer

- Klasse 5 indikatorer, fremstillet i henhold til ISO 11140-1.
- Testmateriale udført på specialpapir 120 g.
- Farvet kemisk forbindelse afsat som lyseblå pletter.
- Holdbarhed 24 måneder fra produktionsdato.

Opbevaring

Mellem +18 °C til +30 °C ved en relativ fugtighed på 20-60 %.
Beskyttes fra direkte sollys og anden kraftig bestråling og varme.

Bortskaffelse

Kan smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald efter autoklavering.

Pakkestørrelse

200 stk.

Artikelnummer

83161 (inkl. PCD)

Sådan anvendes SIMICON KI

1. Tag en kemisk indikator, fold den på midten med prikkerne indad og placer den i en PCD.
2. Læg eventuelt PCD'en i en almindelig sterilisationspose og luk den.
3. Placer posen med PCD'en på et repræsentativt sted i autoklaven, hvor det kan være vanskeligt at sterilisere.
4. Vælg program og start autoklaven.
5. Når programmet er færdigt, tages posen med PCD'en ud af autoklaven. Posen åbnes, og den kemiske indikator aflæses visuelt for farveskift sammenholdt med aflæsningskortet.
6. Frigiv kun indholdet af autoklaven, hvis farveomslaget er korrekt.
7. Noter resultatet i en logbog.

Bestilling

SSI Diagnostica A/S

Herredsvejen 2

3400 Hillerød

T 4829 9100

ivdbestilling@ssidiagnostica.com

shop.ssidiagnostica.com

Yderligere information

Commercial Manager

Helle Vejrup

T 4829 9174

heve@ssidiagnostica.com



SSI Diagnostica A/S

Herredsvejen 2

3400 Hillerød

Denmark

ssidiagnostica.com

E X P E R I E N C E M A T T E R S

