

PRØVETAGNINGSSÆT TIL HUDSVAMPE

Beskrivelse

Prøvetagningskit, bestillingsnummer 62654 til brug ved undersøgelserne:

Dermatofytter i hud (DNA) (R-nr. 041)

Dermatofytter i hår/hårbund (DNA) (R-nr. 042)

Dermatofytter i negle (DNA) (R-nr. 047)

Indhold

- 5 stk. eppendorf/PCR-rør
- 5 stk. forsendelsrør
- 5 stk. prøveæsker

Fremgangsmåde

1. Sprit neglen af.
2. Neglematerialet tages fra det forandrede område af neglen og gerne tæt ved det raske neglevæv. Skrab med skarpske.
3. Halvdelen af neglematerialet placeres i PCR-røret. Den anden halvdel placeres i prøveæsken, der foldes sammen efter anvisningen.
4. Patientidentifikation (navn og CPR nr.) skrives på PCR-røret og prøveæsken. Klistermærke kan evt. påsættes prøveæsken og/eller forsendelsrøret.
5. PCR-røret placeres i forsendelsrøret.
6. Forsendelsrør og prøveæske indsendes til Statens Serum Institut.

Information og bestilling

SSI Diagnostica A/S

Herredsvejen 2

3400 Hillerød

Tel.: 4829 9100

info@ssidiagnostica.com

www.ssidiagnostica.com

shop.ssidiagnostica.com

Vigtig information

Det er vigtigt at indsende materiale både i eppendorfrør **og** prøveæske, da sidstnævnte anvendes, hvis endeligt svar ikke kan opnås ved PCR alene.