

Sådan bruger du antigentesten til næsepodning




Før du bruger testen

**Tjek, at alt indhold er med. Hver æske indeholder to pakker.
I hver pakke skal der være:**

A / Foliepakke. Foliepakken er påtrykt “COVID-19 Rapid Test”,
og hver foliepakke indeholder én testkassette og én “fugtsamler”.

Sådan ser testkassetten ud når den
er taget ud af foliepakken.

Tag den ikke ud, før den skal bruges!

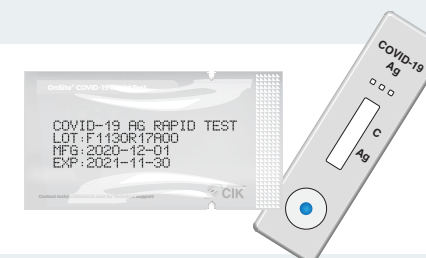

x 1

B / plastikkasse med hul til placering af prøverøret.



x 1

C / Præfyldt bufferrør i blødt plastik.



x 1

D / Dyse (hætte).


x 1

E / Forseglet podepind. Selve podepinden ligner en
lang vatpind – med vat i den ene ende.



Nu skal du gøre dig klar til at tage prøven fra næsen

- A** Rengør testområdet, og stil tingene klar.
Som testområde kan du med fordel benytte et normalt bord.

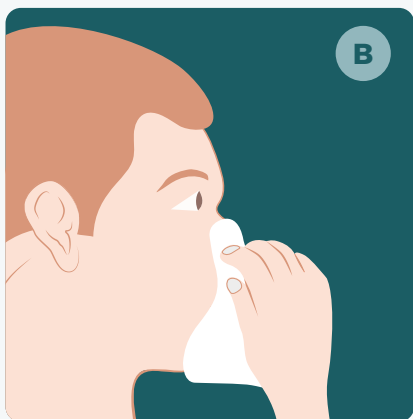

Start med at pudse næsen, så næseborene er så rene som muligt. Smid papiret ud derefter.




Vask nu dine hænder eller brug håndsprit.




Stil plastikkassen på bordet, så siden med hullet vender op.


Step 1: Sådan gør du bufferrøret klar

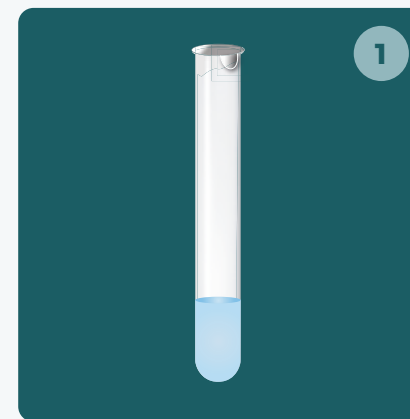


Tag et bufferrør ud af den forseglede pose.

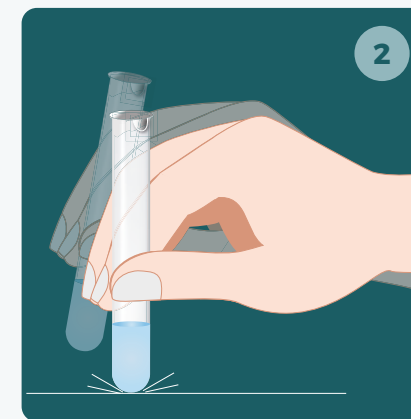

Hold bufferrøret lodret. Bank nu roligt røret på en ren flad overflade. Det gør du for at sikre, at al væsken lægger sig i bunden af røret.

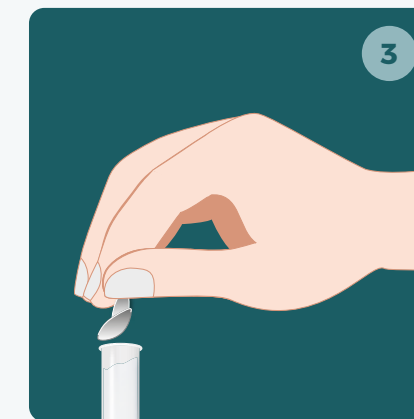


Tag nu forseglingen af bufferrøret med en rolig bevægelse. Smid forseglingen i affaldsposen. Gem posen, da du skal bruge posen igen senere.

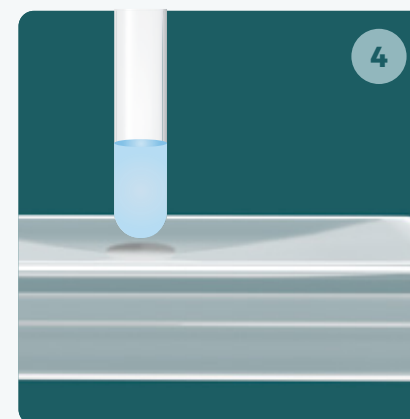

Sæt bufferrøret i hullet på plastikkassen.

Step 2: Sådan bruger du podepinden til at lave en næsepodning

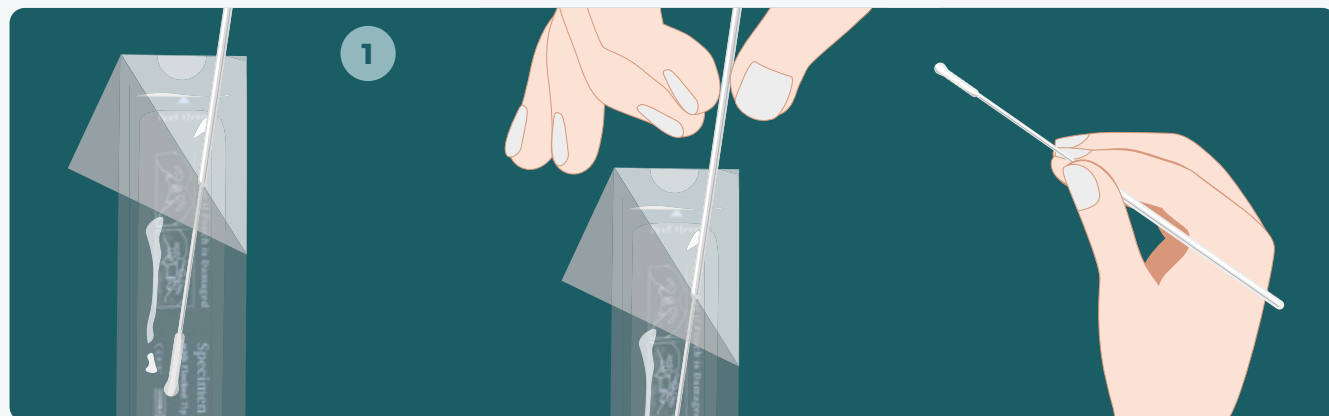


Tag podepinden og åben forseglingen.

Vær opmærksom på at åbne i den ende, hvor der ikke er vat.

Træk forsigtigt podepinden ud.


Gem emballagen, da du kan bruge den, når du har brugt podepinden.

Hold derefter podepinden, på selve plastikdelen uden at røre vatdelen. Som vist på billedet her.

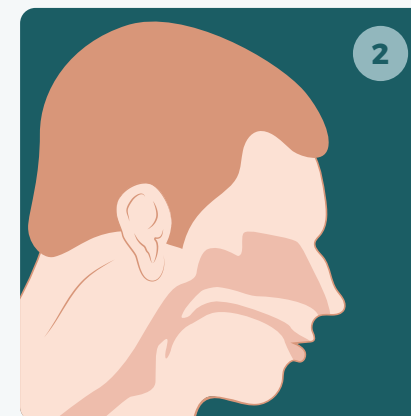

Hold hovedet i en position som vist på tegningen her.


Brug eventuelt et spejl.

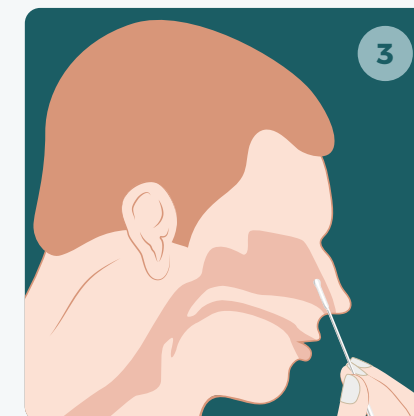

Før nu podepinden roligt op i næseboret med vatdelen først.


Hele vatdelen af podepinden skal være ført op i næsen – så vatdelen er dækket af næseboret.

Når podepinden "møder modstand" i næsen, skal den ikke længere op – max 2-3 cm.

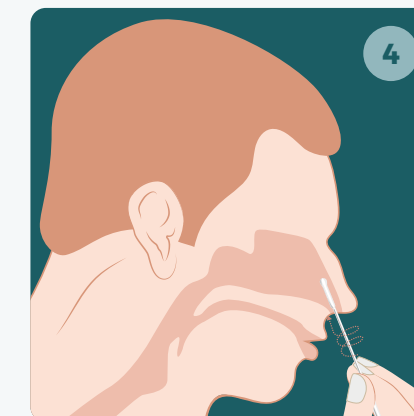

Med cirkelbevægelser, drej nu podepinden rundt ind mod næsevæggen.

Du skal minimum dreje podepinden rundt 5 gange. Det gør man for at sikre, at man får mest mulig prøvemateriale fra næsen.

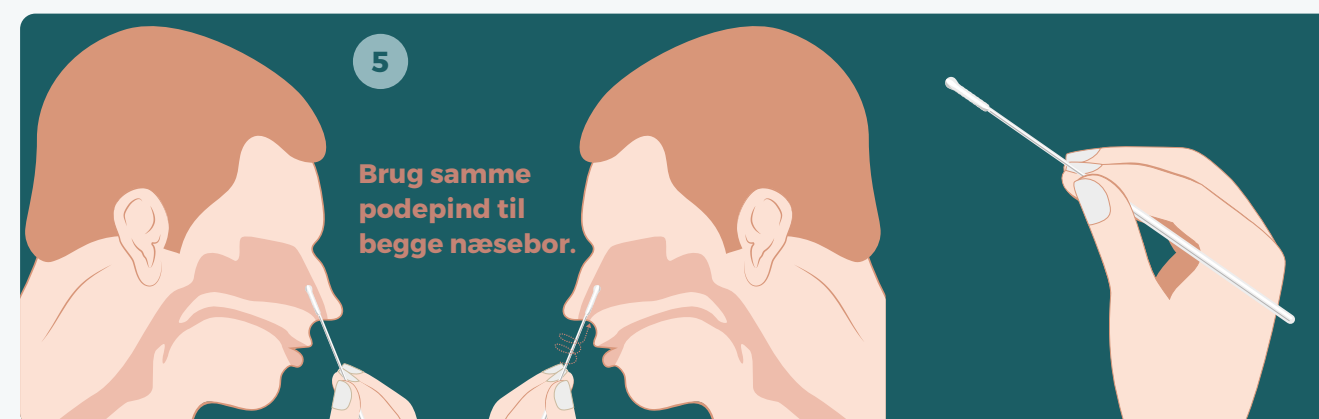

Tag forsigtigt podepinden ud af næseboret og gentag proceduren i **det andet næsebor**.

Drej podepinden rundt 5 gange i det andet næsebor.

Brug samme podepind til begge næsebor.


Når du er færdig med at køre podepinden godt rundt i det andet næsebor, tager du podepinden forsigtigt ud af næsen.

Hold nu podepinden i hånden, uden at den kommer i kontakt med noget.


Dette er meget vigtigt!

Podepinden skal nu ned i bufferrøret for at "blandes".

Step 3: Sådan bruger du den næsepodning, du lige har lavet, sammen med ekstraktionsrøret.

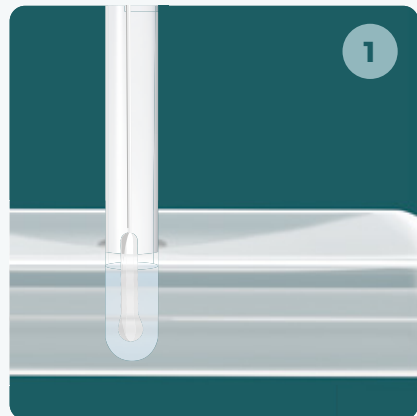


Sæt nu podepinden ned i bufferrøret, som står i plastikkassen.

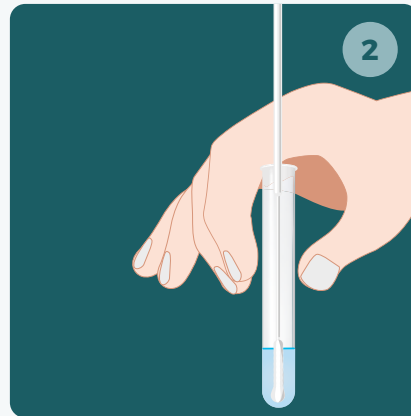

Tag roligt fat om bufferrøret og løft det op fra plastikkassen.

Podepinden skal blive i bufferrøret, mens du gør det.


Hold nu røret mellem fingrene. Fx som vist på billedet.

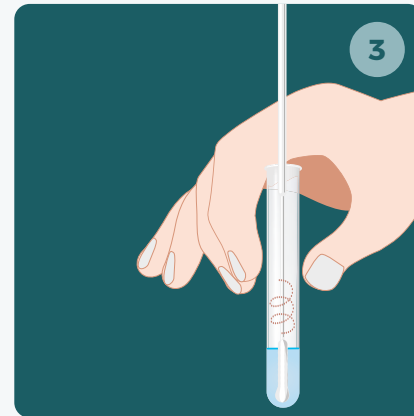

Mens du holder bufferrøret mellem fingrene, begynder du nu at rotere podepinden rundt i væsken.

Du skal minimum rotere podepinden 5 gange.


Det er vigtigt, at vatdelen og væsken bliver blandet grundigt.

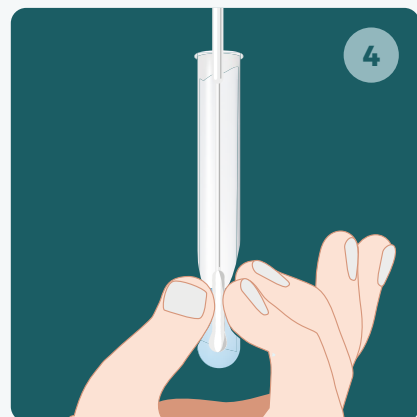

Når du har roteret godt rundt med podepinden i væsken, skal du presse væsken ud af vatdelen på podepinden.


Det gør du ved at presse forsigtigt på vatdelen gennem røret som vist her.

Pres forsigtigt flere gange.

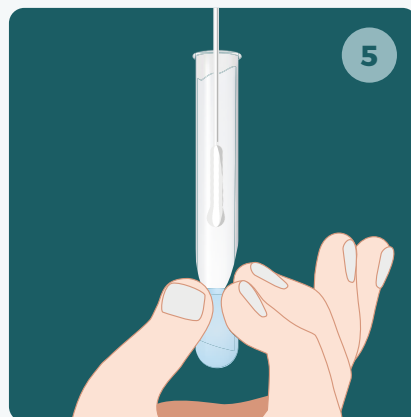


Nu skal podepinden op af bufferrøret.

Det gør du ved at presse på podepinden gennem røret, **samtidigt med** at du roligt trækker podepinden op.

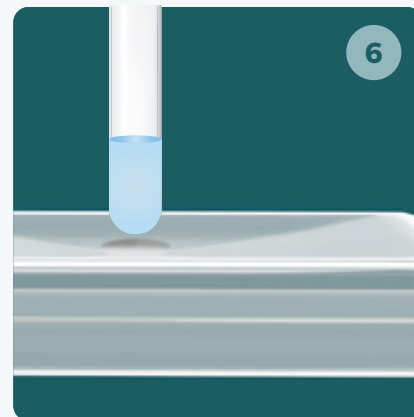


Sæt nu bufferrøret tilbage i plastikkassen.

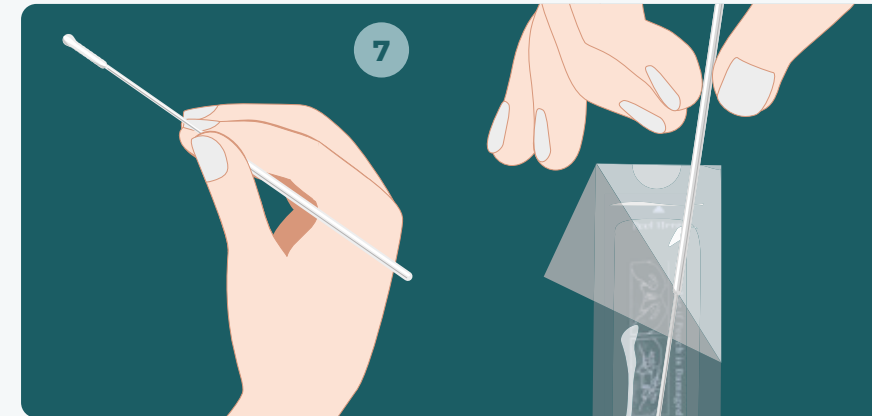

Podepinden som du har taget op skal du ikke bruge mere.


Før podepinden tilbage i den originale indpakning, med vatdelen først.

Du kan smide podepinden ud nu eller gøre det senere. Den skal ikke bruges mere.

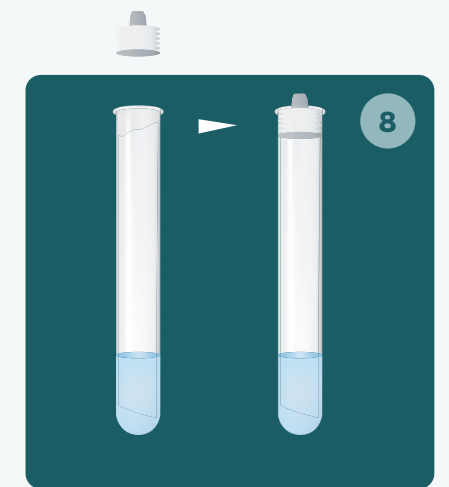


Sæt nu hættten på bufferrøret. Sørg for, den sidder godt fast.

Step 4: Sådan bruger du kassetten til at få et resultat

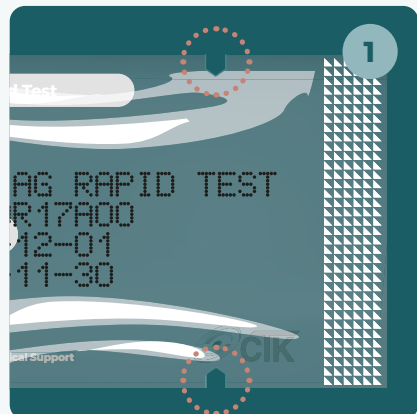

Åben nu foliepakken med kassetten og læg kassetten på den rengjorte overflade (oftest et bord).


På foliepakken er der markering, hvor du kan åbne.

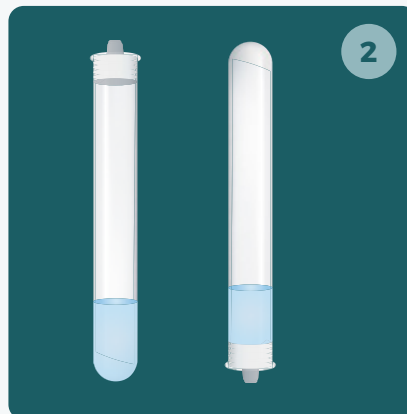

Tag bufferrøret op af Plastikkassen.


Vend bufferrøret og hold det lodret.

Nu er du klar til at dryppe væske i "brønden" på kassetten.

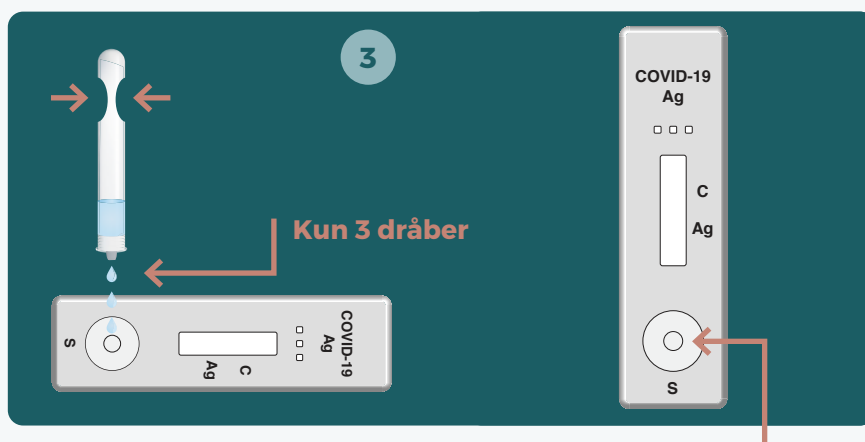

Klem nu forsigtigt på røret, så der kun kommer tre (3) dråber væske ned i kassetten.

De 3 dråber skal ramme "brønden" på kassetten, som findes over bogstavet "S".

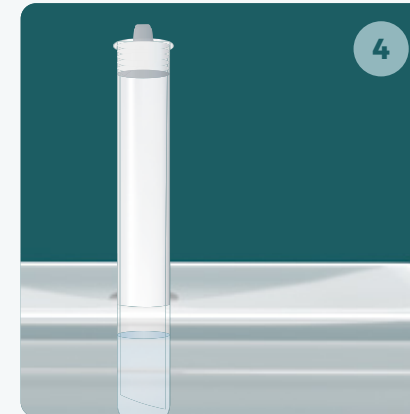

Sæt nu bufferrøret tilbage i plastikkassen. Du skal ikke bruge det mere.


Resultatet skal aflæses, inden der er gået 20 minutter



Sæt et stopur til 15 minutter.

Du kan evt. bruge din telefon til at tage tid.


Efter 15 minutter kan du aflæse resultatet af testen. Resultatet kan godt være synligt inden 15 minutter.

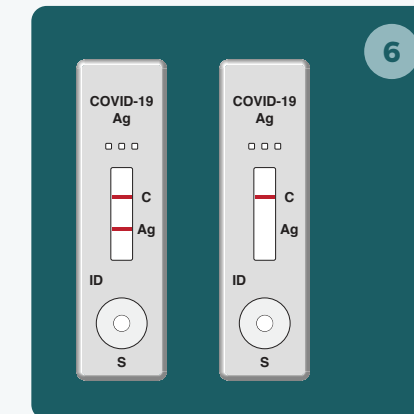

Nu er testen færdig.

Resultatet skal aflæses inden der er gået 20 minutter, så hold øje med kassetten.

På næste side kan du se, hvilke resultater du kan få.

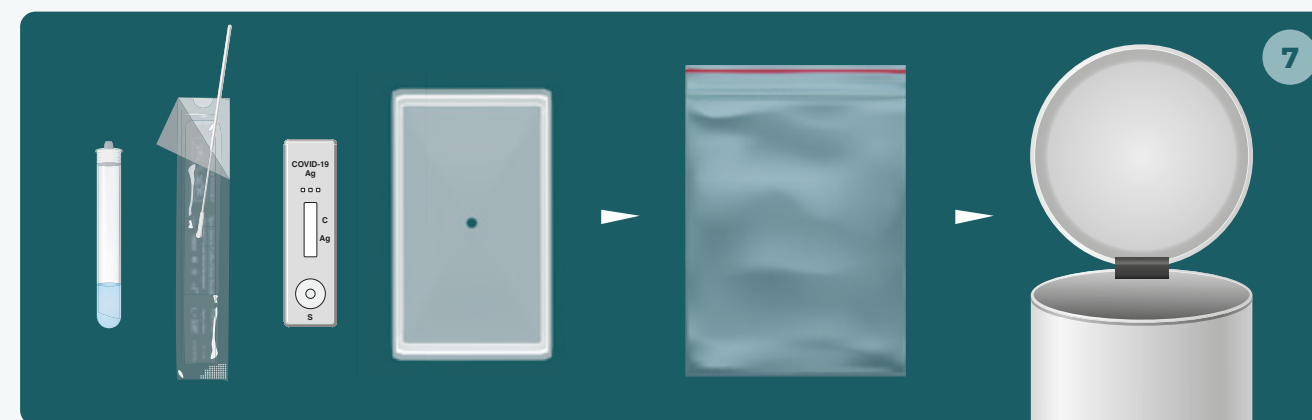

Når du har aflæst resultatet, kan testen smides ud. Smid alt ud, du har brugt til testen. Testkassette, bufferrør og hætte, pødepind og emballage til ovenstående.

Vi anbefaler, at ovenstående testelementer samles i medfølgende affaldspose, som så kan smides ud.



CTK Biotech, Inc.
13855 Stowe Drive
Poway, CA 92064, USA
Tel: 858-457-8698
Fax: 858-535-1739
E-mail: info@ctkbiotech.com




MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

Step 5: Sådan skal du aflæse din test


C = Kontrol-streg

Ag = Antigen

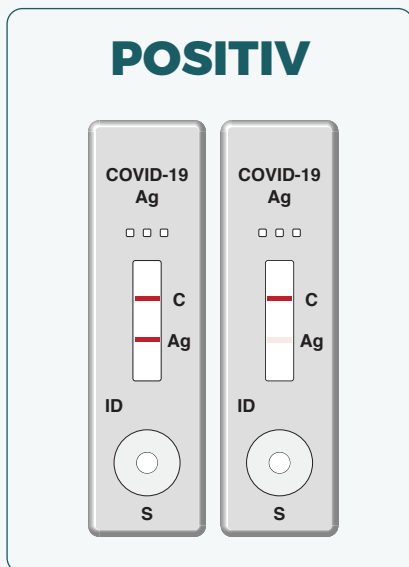


En positiv Antigen-test vil vise to streger på kassetten.
En streg ud for C - viser at testen virker.
En streg ud for Ag - viser at testen er positiv.

Læg mærke til, at strengen udfor "Ag" kan være meget svag. Men kan du se strengen, så skal prøven betragtes som positiv.

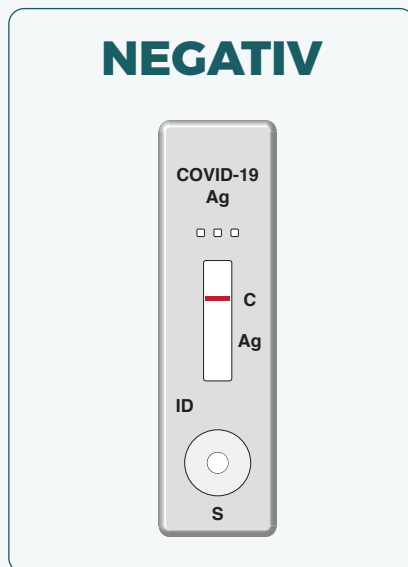

En negativ Antigen-test har kun en streg ud for "C".
Strengen viser, at testen virker, og resultatet er negativt.

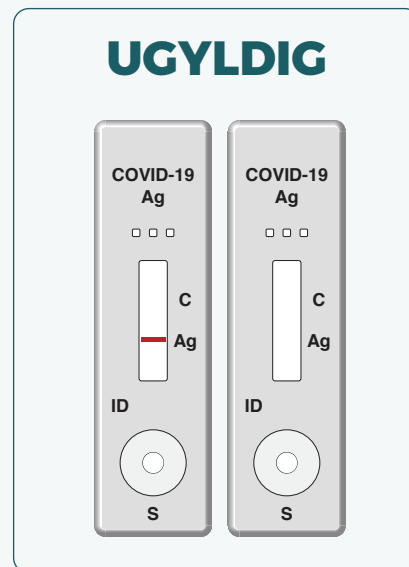

Et testresultat kan også være "ugyldigt".
Et ugyldigt resultat viser sig ved, at der enten ikke er nogen streger på testen, eller at der kun er en streg ud for "Ag".

En ugyldig test kan skyldes, at testen ikke er fortaget korrekt, eller der er en fejl i selve produktet.

Tag en test mere for at se, om den virker. Virker test 2 ikke, så kontakt SSI Diagnostica.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL AT LAVE EN TEST?

Scan koden her og se en kort video om, hvordan testen skal foretages.

Her kan du også stille spørgsmål til testen, og se de oftest stillede spørgsmål og svar.

Du kan også ringe på 48 29 91 00, hvis du har brug for hjælp.

Eller sende en mail til info@ssidiagnostica.com

Så vender vi tilbage hurtigst muligt.