



Verwendung des Antigen-Selbsttests für Nasenabstriche



BENÖTIGEN SIE HILFE BEI EINEM TEST?

Scannen Sie diesen Code, um ein kurzes Video anzusehen, das die Durchführung des Tests erklärt. Auf dieser Webseite können Sie auch Fragen stellen und häufig gestellte Fragen durchsuchen: ssidiagnostica.com/de/selbsttest



Verwendung des Tests

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ein vollständiges Testset haben.

Eine Box enthält zwei Testsets. Jedes Set enthält:

A / Einen Folienbeutel. Auf dem Folienbeutel ist „COVID-19 Rapid Test“ (COVID-19 Schnelltest) aufgedruckt. Jeder Folienbeutel enthält eine Testkassette und einen Silikagel-Beutel.



Dies ist der Folienbeutel und die darin enthaltene Testkassette. Entnehmen Sie die Kassette erst, wenn Sie sie brauchen.

x 1

B / Die Kit-Box fungiert als Röhrchenhalter



x 1

C / Vorgefülltes Pufferröhrchen aus weichem Kunststoff.



x 1

D / Düse




x 1

E / Versiegelter Tupfer. Der Tupfer ähnelt einem langen gewöhnlichen Wattestäbchen mit Watte an einem Ende.



x 1

F / Müllbeutel. Sammeln Sie den gesamten Testabfall im Müllbeutel und entsorgen Sie ihn.

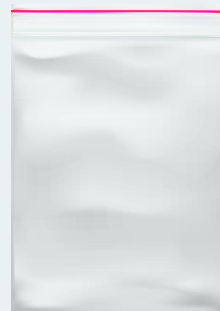

Benötigte Teile, die nicht im Karton enthalten sind:

Ein Taschentuch zum Schnäuzen, ein Spiegel und eine Stoppuhr (z. B. auf Ihrem Smartphone).

Die Box enthält auch eine Gebrauchsanweisung (*hier nicht abgebildet*). Bitte lesen Sie diese, wenn Sie weitere Informationen zum Test benötigen.


BENÖTIGEN SIE HILFE BEI EINEM TEST?

Scannen Sie diesen Code, um ein kurzes Video anzusehen, das die Durchführung des Tests erklärt. Auf dieser Webseite können Sie auch Fragen stellen und häufig gestellte Fragen durchsuchen: ssidiagnostica.com/de/selbsttest



Führen Sie zuerst den Nasenabstrich durch

- A** Suchen Sie eine ebene Fläche (z. B. eine Tischplatte).
Reinigen Sie sie und stellen Sie die Ausrüstung auf.

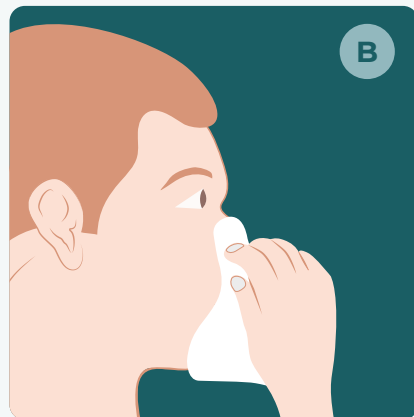

Schnäuzen Sie sich, um beide Nasenlöcher möglichst gründlich zu reinigen. Entsorgen Sie das Taschentuch.




Waschen Sie Ihre Hände oder verwenden Sie ein Händedesinfektionsmittel




Stellen Sie die Kit Box mit dem Loch nach oben auf die Oberfläche.


Schritt 1: Bereiten Sie das Pufferröhrchen vor

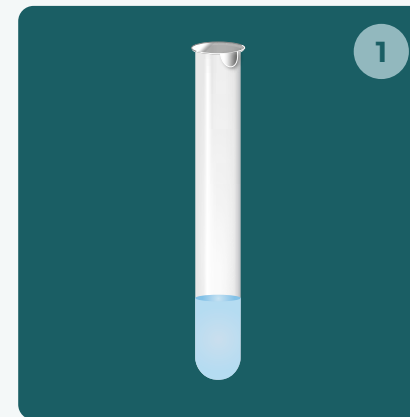

Entnehmen Sie das Pufferröhrchen aus dem versiegelten Beutel.

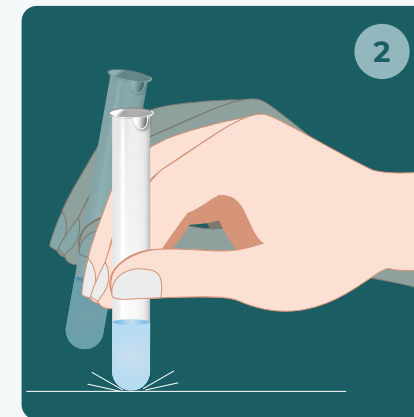

Halten Sie das Pufferröhrchen aufrecht. Klopfen Sie mit dem Boden des Röhrchens auf die flache Oberfläche, sodass der Großteil der Flüssigkeit auf den Boden des Röhrchens gelangt.

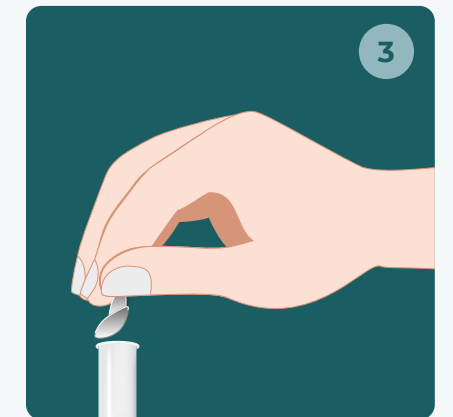

Lösen Sie vorsichtig die Versiegelung des Pufferröhrchens. Entsorgen Sie die Versiegelung in dem mit dem Test mitgelieferten Müllbeutel. Bewahren Sie den Müllbeutel für später auf.




Setzen Sie das Pufferröhrchen in das Loch in der Kit Box ein.

BENÖTIGEN SIE HILFE BEI EINEM TEST?

Scannen Sie diesen Code, um ein kurzes Video anzusehen, das die Durchführung des Tests erklärt. Auf dieser Webseite können Sie auch Fragen stellen und häufig gestellte Fragen durchsuchen: ssidiagnostica.com/de/selbsttest



Schritt 2: So verwenden Sie den Tupfer für einen Nasenabstrich

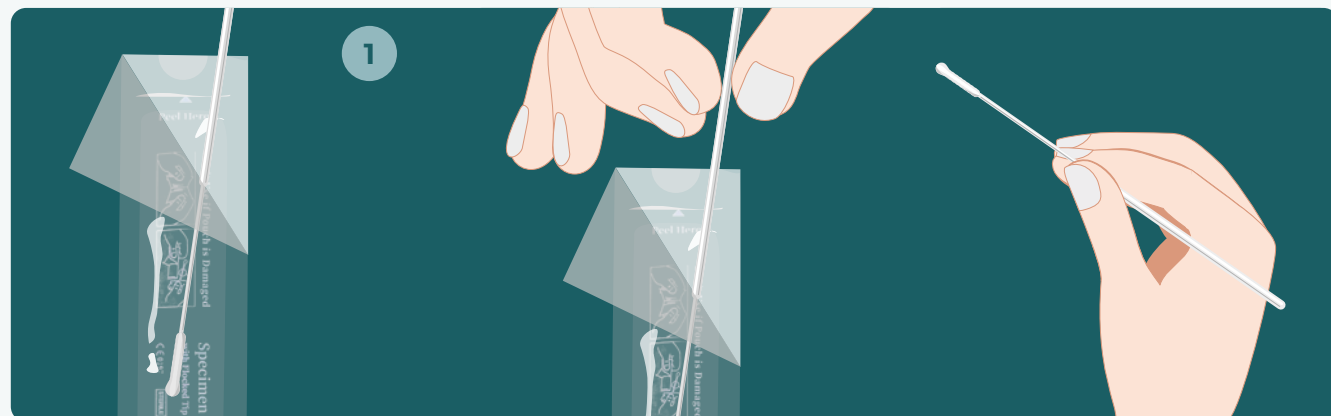


Nehmen Sie den Tupfer und öffnen Sie die Versiegelung an dem Ende ohne Watte.


Entnehmen Sie vorsichtig den Tupfer.

Bewahren Sie den Beutel auf, um den Tupfer später zu entsorgen.

Halten Sie den Tupfer wie abgebildet am Kunststoffteil, ohne die Watte zu berühren

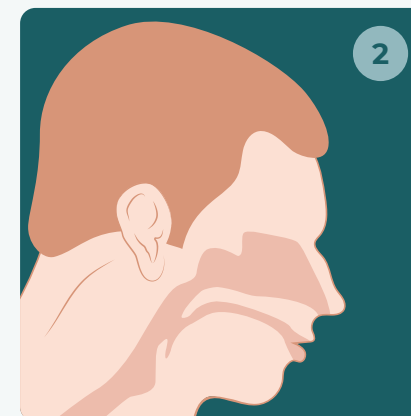


Halten Sie Ihren Kopf wie abgebildet. Sie können auch einen Spiegel verwenden.

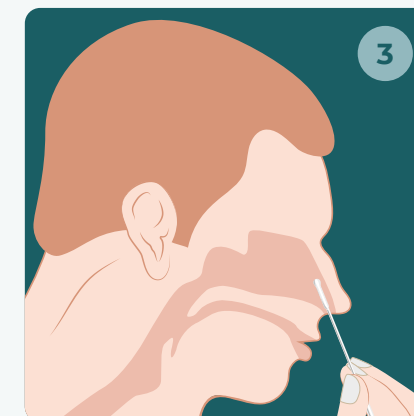

Führen Sie den Watteteil des Tupfers ruhig in ein Nasenloch ein.


Der gesamte Watteteil muss in das Nasenloch eingeführt werden.

Drücken Sie den Tupfer nicht weiter hinein, wenn er auf Widerstand trifft (max. 2–3 cm).

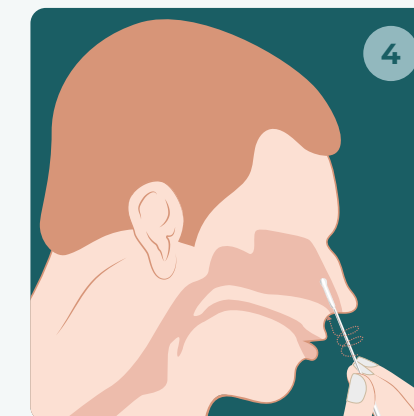

Drücken Sie den Tupfer in kleinen Kreisen reibend gegen die Nasenwand.

Bewegen Sie den Tupfer mindestens 5 Mal rundum. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie genügend Probenmaterial aus dem Nasenloch bekommen.

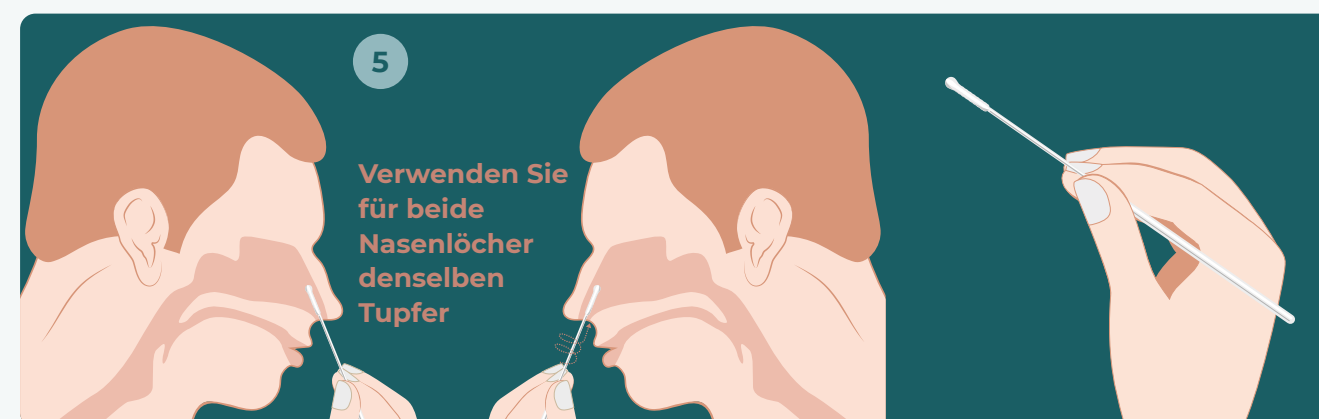

vorsichtig heraus und wiederholen Sie den Vorgang **im anderen Nasenloch**.

Bewegen Sie den Tupfer etwa 5 Mal wie oben beschrieben in Ihrem anderen Nasenloch.

Verwenden Sie für beide Nasenlöcher denselben Tupfer.

Wenn Sie fertig sind, entfernen Sie den Tupfer vorsichtig aus Ihrem Nasenloch

Halten Sie den Tupfer so, dass er nichts berührt.

Das ist wichtig!

Der Tupfer muss nun zum „Mischen“ in das Pufferröhrchen platziert werden.

BENÖTIGEN SIE HILFE BEI EINEM TEST?


Scannen Sie diesen Code, um ein kurzes Video anzusehen, das die Durchführung des Tests erklärt. Auf dieser Webseite können Sie auch Fragen stellen und häufig gestellte Fragen durchsuchen: ssidiagnostica.com/de/selbsttest



Schritt 3: Verwendung des Nasentupfers mit dem Pufferröhrchen.




Führen Sie den Tupfer in das Pufferröhrchen ein, das aufrecht in der Kit Box steht

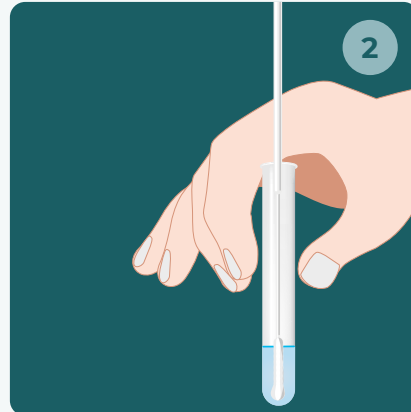

Heben Sie das Pufferröhrchen vorsichtig aus der Kit box.

Der Tupfer muss beim Anheben im Röhrchen bleiben.


Halten Sie das Röhrchen wie abgebildet zwischen Ihren Fingern.

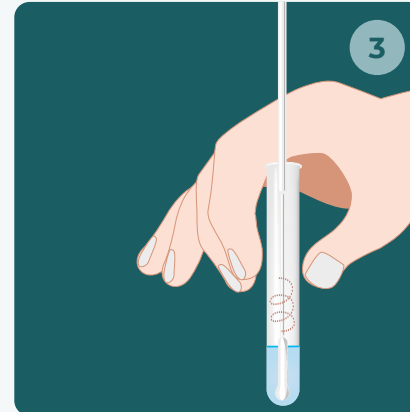

Während Sie das Röhrchen halten, drehen Sie den Tupfer mit der in Flüssigkeit getauchten Watte.

Drehen Sie den Tupfer mindestens 5 Mal.


Es ist wichtig, dass der Watteteil gründlich mit der Flüssigkeit durchnetzt wird.

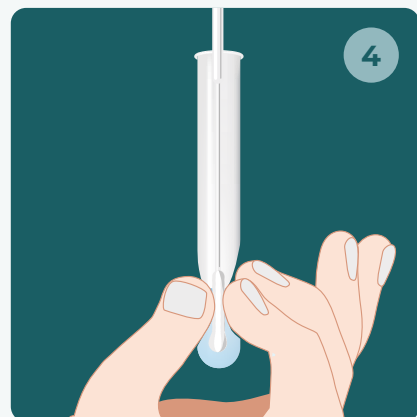

Nachdem Sie den Tupfer in der Flüssigkeit gedreht haben, drücken Sie die Flüssigkeit aus dem Watteteil des Tupfers.

Drücken Sie den Watteteil dazu wie abgebildet vorsichtig durch das Röhrchen.

Drücken Sie ihn mehrmals vorsichtig aus.

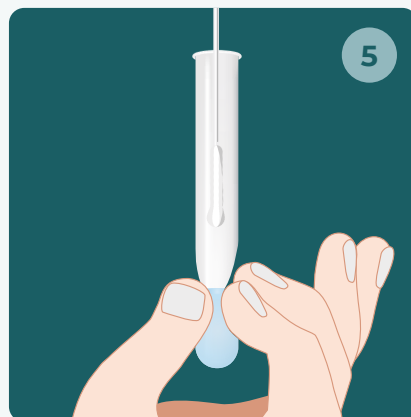


Nun muss der Tupfer aus dem Röhrchen entfernt werden.

Drücken Sie den Watteteil dazu leicht durch das Röhrchen, **während** Sie den Tupfer ruhig herausziehen.




Setzen Sie nun das Pufferröhrchen wieder in die Kit Box ein.

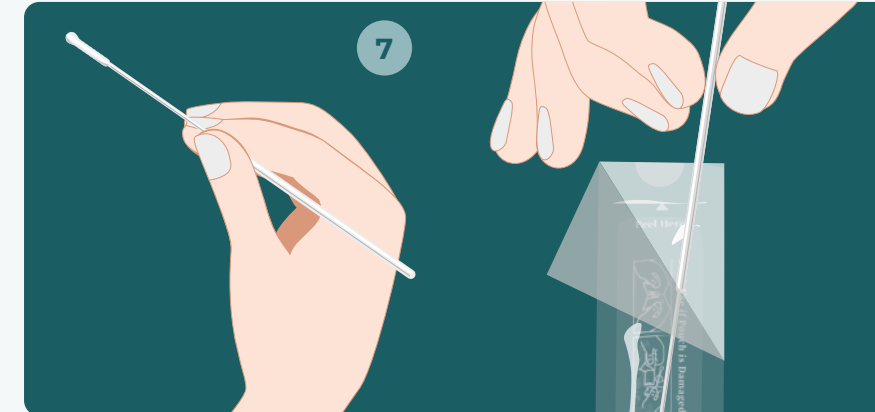

Jetzt brauchen Sie den Tupfer nicht mehr.

Geben Sie den Tupfer mit dem Watteteil in den Beutel, in dem er geliefert wurde.

Sie können den Tupfer jetzt oder später wegwerfen. Sie brauchen ihn nicht mehr.

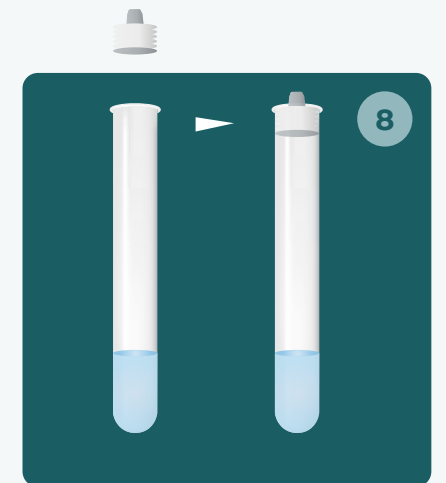

Bringen Sie die Düse am Pufferröhrchen an. Stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.

BENÖTIGEN SIE HILFE BEI EINEM TEST?

Scannen Sie diesen Code, um ein kurzes Video anzusehen, das die Durchführung des Tests erklärt. Auf dieser Webseite können Sie auch Fragen stellen und häufig gestellte Fragen durchsuchen: ssidiagnostica.com/de/selbsttest




Schritt 4: Verwendung der Kassette zur Anzeige des Ergebnisses



Öffnen Sie nun den Folienbeutel mit der Kassette und legen Sie diese auf die saubere Unterlage.


Auf der Folie ist markiert, wo sie zu öffnen ist.

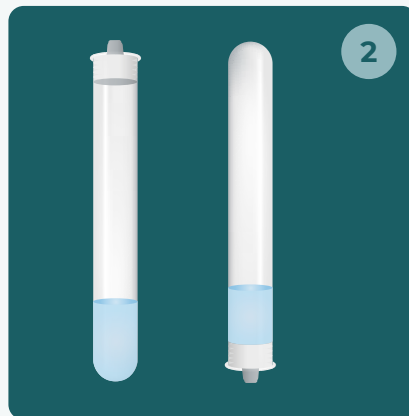

Entnehmen Sie das Puffer-
röhrchen aus der Kit Box.

Drehen Sie das Röhrchen um
und halten Sie es verkehrt
herum.

Jetzt können Sie Flüssigkeit
in die Vertiefung der Kassette
füllen.

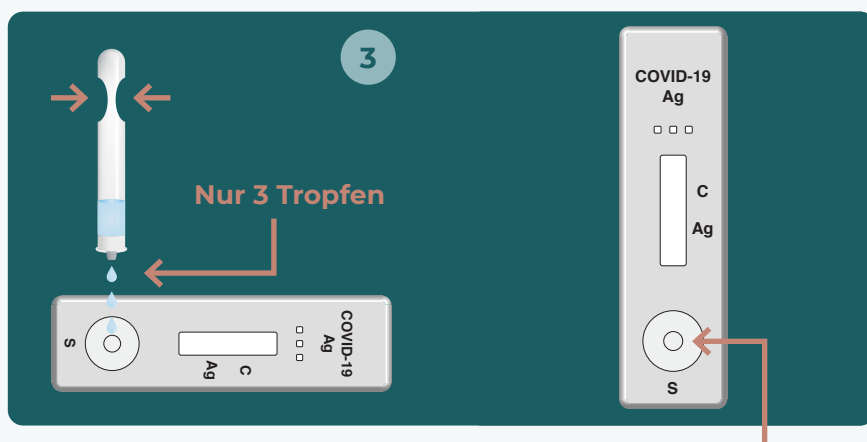

Drücken Sie das Röhrchen
vorsichtig zusammen, um
nur drei (3) Tropfen in die
Kassette zu geben.

Die drei Tropfen müssen
die mit dem Buchstaben „S“
gekennzeichnete Vertiefung
der Kassette treffen.



Legen Sie das Puffer-
röhrchen
wieder in die Kit Box.


Sie brauchen ihn nicht mehr.

**Das Ergebnis muss innerhalb
von 20 Minuten abgelesen
werden**



Stellen Sie einen Timer auf 15
Minuten ein. Sie können dazu
Ihr Smartphone verwenden.


Das Testergebnis kann **nach
15 Minuten** abgelesen wer-
den. Es kann bereits angezeigt
werden, bevor die 15 Minuten
verstrichen sind.

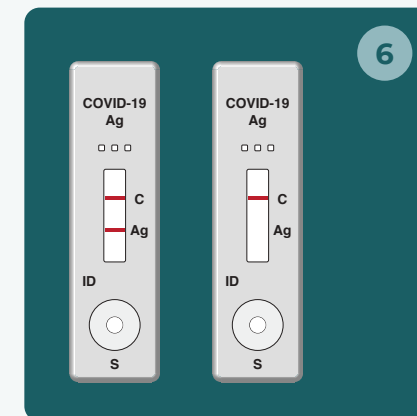

Sie haben den Test abge-
schlossen.

**Das Ergebnis muss innerhalb
von 20 Minuten abgelesen
werden. Behalten Sie daher
die Kassette im Auge.**

**Wie Sie das Ergebnis ab-
lesen, erfahren Sie auf der
nächsten Seite**

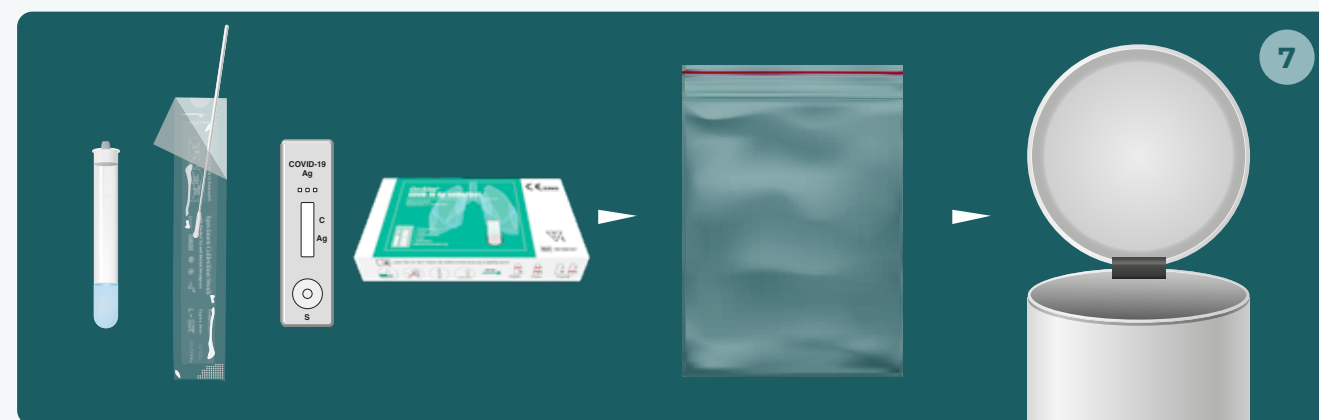

Wenn der Test abgeschlossen ist, können Sie die Ausrüstung wegwerfen. Werfen Sie alle Teile weg, die Sie für den Test verwendet haben: Die Testkassette, das Puffer-
röhrchen und die Düse, den Tup-
fer und die gesamte Verpackung.

Wir empfehlen Ihnen, alle Teile im mitgelieferten Müllbeutel zu sammeln und diesen zu entsor-
gen.

BENÖTIGEN SIE HILFE BEI EINEM TEST?

Scannen Sie diesen Code, um ein kurzes Video anzusehen, das die Durchführung des Tests erklärt. Auf dieser Webseite können Sie auch Fragen stellen und häufig gestellte Fragen durchsuchen: ssidiagnostica.com/de/selbsttest




CTK Biotech, Inc.
13855 Stowe Drive
Poway, CA 92064, USA
Tel: 858-457-8698
Fax: 858-535-1739
E-mail: info@ctkbiotech.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

Schritt 5: Ablesen des Testergebnisses

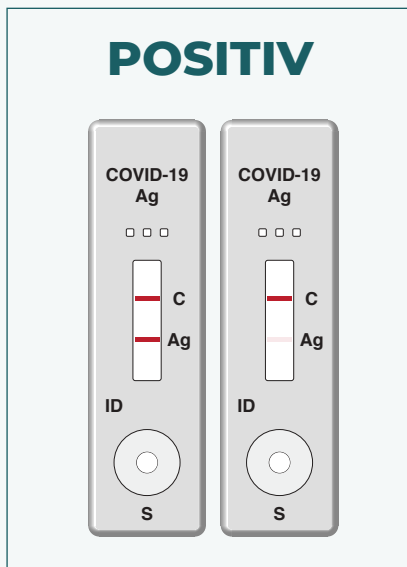


Ein positives Ergebnis des Antigentests wird durch zwei Linien auf der Kassette angezeigt.

Eine C-Linie zeigt an, dass der Test funktioniert.


Eine Ag-Linie zeigt ein positives Testergebnis an.

Bitte beachten Sie, dass die Ag-Linie sehr schwach sein kann. Eine sichtbare Ag-Linie ist jedoch als positives Testergebnis zu verstehen.

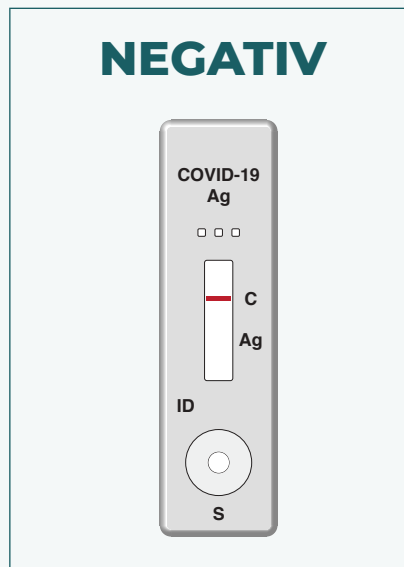

Bei einem negativen Testergebnis wird nur eine C-Linie angezeigt.

Die Linie zeigt an, dass der Test funktioniert und dass das Ergebnis negativ ist.

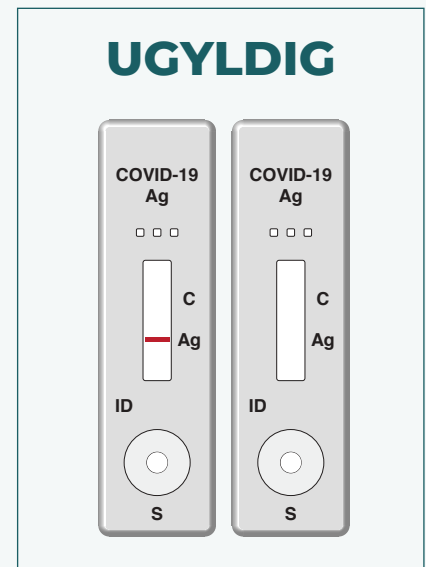

Ein Testergebnis kann ungültig sein.

Wenn nur die Ag-Linie oder keine Linie zu sehen ist, ist der Test ungültig.

Ein ungültiger Test kann entweder durch eine fehlerhafte Testdurchführung oder durch eine fehlerhafte Ausrüstung verursacht werden.

Führen Sie einen weiteren Test durch, um zu sehen, ob dieser funktioniert. Falls nicht, wenden Sie sich bitte an SSI Diagnostica.

BENÖTIGEN SIE HILFE BEI EINEM TEST?

Scannen Sie diesen Code, um ein kurzes Video anzusehen, das die Durchführung des Tests erklärt.

Auf dieser Webseite können Sie auch Fragen stellen und häufig gestellte Fragen durchsuchen.

Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie auch 0045 48 29 91 00 anrufen. Oder senden Sie eine E-Mail an info@ssidiagnostica.com

