

BRUGSANVISNING

Serumbouillon med sakkarose

ANVENDELSE

Serumbouillon med sakkarose er et beriget dyrkningsmedium til opformering af bakterier.

SAMMENSÆTNING

	g/L
Koncentrat af oksekød	368,0
Glukose	0,9
Uorganiske salte	4,6
Sakkarose	0,6
Pepton	9,20
Hesteserum*	47,8
Defibrineret hesteblood*	2,90
pH 7,4 ± 0,2	

*Mængde angivet i mL/L

PRINCIP

Basalt medium baseret på oksebouillon, beriget med defibrineret hesteblood og hesteserum.

PROCEDURE

Røret tilsåes med 1 µL øjepodenål fra pladekultur. Der inkuberes i min. 16 timer i alm. atmosfære ved 35,0°C ± 2,0°C. Der undersøges for vækst efter min. 16 timer.

KVALITETSKONTROL

Referencestamme	Vækst
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Moderat - God
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Moderat - God
<i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 10211	Hæmmet - God

UDSEENDE

Serumbouillon i rør er klar/svag uklar og gulbrun farve

OPBEVARING OG HOLDBARHED

Serumbouillon skal opbevares ved 2-8°C og har en holdbarhed på 90 dage fra produktion.

FORHOLDSREGLER

Kun til professionel anvendelse med henblik på *in vitro* diagnostik. **IVD**

Anvend ikke produktet, hvis der er tegn på mikrobiel kontaminering, misfarvning, udtørring eller andre tegn på forældelse. Tilsåede produkter skal bortskaffes efter gældende regler om klinisk risiko affald.

PRODUKTER

Varenr. 1041 Serumbouillon med sakkrose -7 mL (20 stk/pk)
Varenr. 1042 Serumbouillon med sakkrose -75 mL

KVALITETSSIKRING

SSI Diagnostica er kvalitetssikret og certificeret i hht. ISO 13485. Analysecertifikater og sikkerhedsdatablad kan downloades på vores hjemmeside www.ssidiagnostica.com.



INFORMATION OG BESTILLING

SSI Diagnostica A/S
Herredsvejen 2
3400 Hillerød
Denmark
T +45 4829 9100
info@ssidiagnostica.com
ssidiagnostica.com
shop.ssidiagnostica.com